

Hygiène du nez



Le geste essentiel pour la toilette de bébé

Dans les premiers mois de sa vie, bébé respire presque exclusivement par le nez et ne sait pas se moucher. Ses défenses naturelles, encore immatures, en font un être fragile. La solution pour le protéger : **STÉRIMAR bébé**. Un geste simple d'hygiène quotidienne pour un nez en bonne santé.



Le geste qui rend le sourire à bébé

Bébé vit très mal le fait d'avoir le nez encombré car il ne sait pas bien respirer par la bouche. Dès que ses muqueuses s'obstruent, il dort mal, devient grognon, boude son repas et risque aussi de se déshydrater. Utilisé tous les jours, lors de la toilette, **STÉRIMAR bébé** garantit un parfait lavage du nez. Dès la première pulvérisation, il respire mieux et retrouve le sourire. Véritable alternative au sérum physiologique, **STÉRIMAR bébé** aide aussi à prévenir des pathologies de la sphère ORL (rhumes, rhinopharyngites, otites...) en renforçant les défenses naturelles de sa muqueuse nasale.

Un petit nez chouchouté...

Riche en oligo-éléments et en sels minéraux, **STÉRIMAR bébé** est une solution isotonique d'eau de mer qui n'irrite pas la muqueuse nasale de bébé car sa concentration en sel est similaire à celle des cellules de son organisme. Son embout bébé, muni d'une collerette, a été adapté pour éviter tout traumatisme et son jet tout doux spécialement conçu pour ne pas aggraver son nez. Alors dès le premier âge, adoptez le geste **STÉRIMAR bébé** !



FACILE
FORMAT
50 ml
À EMPORTER

Disponible en pharmacie et parapharmacie.



Le lavage du nez de bébé : mode d'emploi

Installer bébé en position couchée sur le côté ou en position assise tête inclinée sur le côté :

- effectuer une 1^{re} pulvérisation pour amorcer le système,
- introduire délicatement l'embout dans sa narine,
- administrer une pulvérisation et laisser s'écouler l'excédent de la solution qui doit entraîner les mucosités, puis moucher,
- nettoyer l'embout à l'eau savonneuse, rincer et essuyer,
- renouveler l'opération dans l'autre narine.